

## MEINE ABSATZHÖHENTABELLE

Maß - A

Datum

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Wenn Ihre Protheseneinstellung von Ihrer/Ihrem OrthopädietechnikerIn geändert wurde, messen Sie bitte das Maß - A erneut.



## PRO-FLEX® LP ALIGN

Schuhwechsel - So stellen Sie Ihren Pro-Flex LP Align richtig ein.  
- für AnwenderInnen -



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

20

## HILFSMITTEL

- Lineal
- Klebezettel oder Klebeband
- Stift

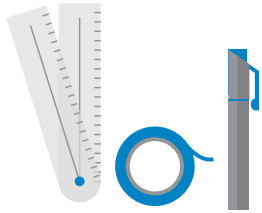


ABBILDUNG 1.


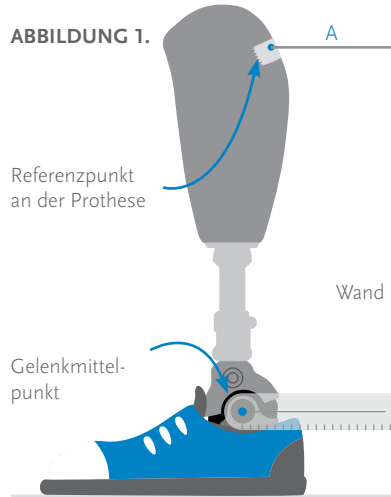


ABBILDUNG 2.

Stellen Sie die Prothese so ein, dass der Referenzpunkt den gleichen Abstand zur Wand hat wie Ihr Maß - A.

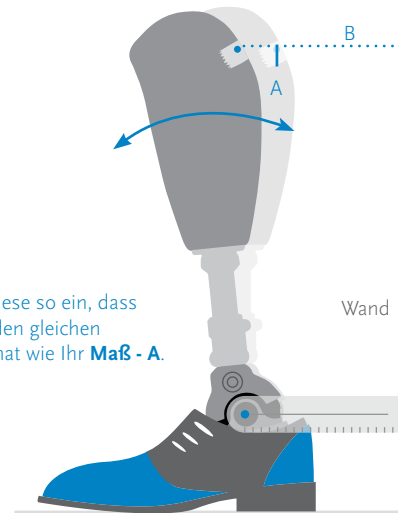

## ANLEITUNG

**SCHRITT 1:** Markieren Sie einen Referenzpunkt am hinteren Schafrand Ihrer Prothese - Hinweis: Um die Markierung nicht direkt auf der Prothese machen zu müssen, nutzen Sie einen Klebezettel oder Klebeband, das Sie anschließend leicht wieder entfernen können.

**SCHRITT 2:** Positionieren Sie das Loch des Lineals am Gelenkmittelpunkt und das flache Ende gegen die Wand. (Siehe Abbildung 1.)

**SCHRITT 3:** Verändern Sie die Position der Prothese nicht mehr. Nehmen Sie nun das Lineal und Messen Sie die Distanz zwischen dem markierten Referenzpunkt und der Wand. Notieren Sie die Distanz als Ihr Maß - A. (Siehe Abbildung 1.)

**SCHRITT 4:** Wechseln Sie den Schuh an Ihrer Prothese zu dem Schuh, den Sie gerne tragen möchten.

**SCHRITT 5:** Richten Sie die Prothese mit Hilfe des Lineals erneut an der Wand aus. (Wie in Schritte 2. beschrieben)

**SCHRITT 6:** Messen Sie den neuen Abstand zwischen Ihrem Referenzpunkt am Schaft und der Wand - Maß B. (Siehe Abbildung 2.)

**SCHRITT 7:** Um den Fußwinkel anzupassen drücken Sie zum Entriegeln den Knopf am Knöchelmodul von innen nach außen. Halten Sie nun den Fuß mit einer Hand gut fest und drücken oder ziehen Sie den Schaft mit der

anderen Hand, um den Winkel des Fußes anzupassen. Der Abstand zwischen Wand und Referenzpunkt muss anschließend wieder dem Maß - A entsprechen.

Wenn das Maß - A größer als das gemessene Maß - B ist, ziehen Sie den Schaft von der Wand weg.

Wenn das Maß - A kleiner als das Maß - B ist, drücken Sie den Schaft Richtung Wand.

**SCHRITT 8:** WICHTIG: zum Verriegeln drücken Sie den Knopf am Knöchelmodul wieder zurück von außen nach innen. **Der Fuß darf nur mit verriegeltem Knöchelmodul verwendet werden!** Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/Ihren OrthopädietechnikerIn.

### HINWEIS:

- Wenn Sie die Schuhe wechseln, messen Sie erneut Maß - B.
- Wenn Ihre Protheseneinstellung von Ihrer/Ihrem OrthopädietechnikerIn geändert wurde, messen Sie bitte das Maß - A erneut.
- Bitte üben Sie diese Schritte und Einstellungen zusammen mit Ihrer/Ihrem OrthopädietechnikerIn.
- Diese Anleitung kann für Unterschenkel- und Oberschenkel- sowie Knie- und Hüftversorgung verwendet werden.

P-950152DE-DE

