

LE MIE MISURE

Misura A

Data

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Se l'invasatura o l'allineamento della protesi sono stati modificati dal protesista, prendere una nuova misura A.



PRO-FLEX® LP ALIGN

Cambio delle scarpe - come regolare
Pro-Flex LP Align



STRUMENTAZIONE

- Righello
- Nastro adesivo
- Pennarello

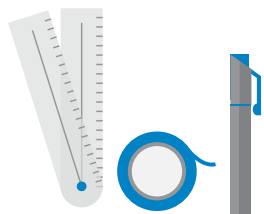


FIGURA 1

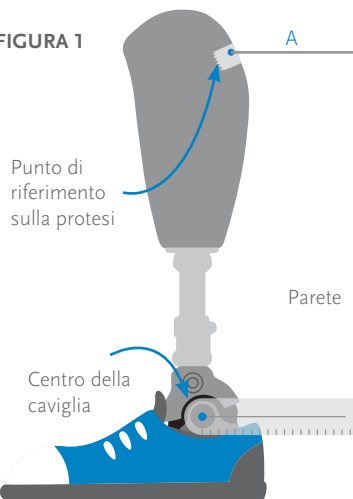


FIGURA 2

Regolare la protesi in modo che il punto di riferimento sia ad una distanza dalla parete **uguale alla misura A**.



ISTRUZIONI

FASE 1: Prendere un punto di riferimento sul retro dell'invasatura con il nastro adesivo o il pennarello.

FASE 2: Prendere il righello (in dotazione) e posizionare la cerniera/il foro sopra il centro della caviglia e l'estremità piatta contro la parete come mostrato nella Figura 1.

FASE 3: Misurare la distanza tra il punto di riferimento sull'invasatura e la parete e annotarla come misura A. (vedere Figura 1)

FASE 4: Cambiare la scarpa sulla protesi con quella che si desidera indossare.

FASE 5: Con il righello, allineare la protesi alla parete come spiegato nella **FASE 2**.

FASE 6: Misurare la nuova distanza tra la parete e il punto di riferimento sull'invasatura, indicata da B nella figura 2.

FASE 7: Per regolare l'angolo del piede, premere il pulsante interno per sbloccare la caviglia, tenere fermo il piede e spostare l'invasatura indietro o in avanti per ripristinare la misura A. Il punto di riferimento deve essere sempre ad una distanza uguale alla misura A.

Se la **misura A** è superiore alla misura B, **portare l'invasatura in avanti**.

Se la **misura A** è inferiore alla misura B, **portare l'invasatura verso la parete**.

FASE 8: IMPORTANTE: premere il pulsante esterno per bloccare la caviglia. Ora è possibile usare la protesi in sicurezza.

NOTA:

- Al successivo cambio delle scarpe, prendere una nuova misura B.
- Se l'invasatura o l'allineamento della protesi sono stati modificati dal protesista, prendere una nuova misura A.
- Fare pratica su queste fasi con il proprio protesista.
- Queste istruzioni sono da considerarsi valide per gli amputati transtibiali, transfemorali e con disarticolazione del ginocchio.

