

4SEAL CLASSIC™



För transfemoralt amputerade protes användare.


Silikonet är hudvänligt och enkelt att rengöra. Försedd med ett s.k. Umbrellan-material som är speciellt utformat för att hantera fantomsmärta.*

- Fyra tätningssringar ger säker suspension mellan stump och protes.
- Easy Glide för enkel på- och avtagning utan alkoholgel/spraysamt enkel rengöring.
- Riktningssmarkeringar på in- och utsida gör det lättare att ta på linern rätt.

Mät stumpens omkrets ca 4 cm från distala änden och välj liner av rätt mått eller storleken under.

Mät stumpens längd och omkrets i nivå med perineum för att bedöma profil - standard eller konisk (se s. 68).

Brukarinformation	
Amputationsnivå:	Transfemoral, knäledsexartikulation
Impact:	Alla
Linerinformation	
Storlekar Standard:	26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50
Storlekar Konisk:	25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Profil:	Standard eller konisk
Matrix:	Fullängd
Garanti:	6 mån

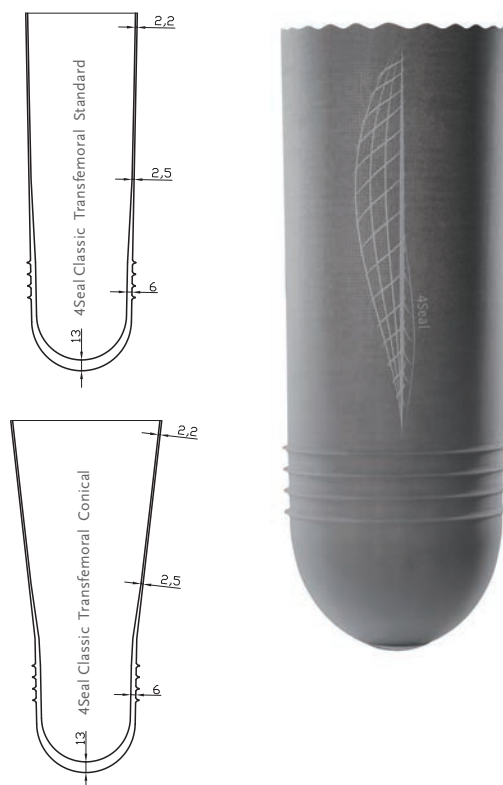

*Kern, U., Altkemper, B., Kohl, M. (2006). "Management of Phantom Pain with a Textile Electromagnetically-Acting Stump Liner". J Pain Symptom Manage. Oct;32(4):352-60.

SUSPENSIONSMETOD



4SEAL

EGENSKAPER



STABILIZING MATRIX



CONICAL



EASY GLIDE



UMBRELLAN


4SEAL CLASSIC

Art.nr.	Profil	Suspensionsmetod
M8917xx	Standard	4Seal
M8918xx	Konisk	4Seal

4SEAL CLASSIC™

VAL AV STORLEK

- Mät stumpens omkrets 4 cm från den distala änden (D).
Omkremsmättet minus 0-1 cm = linerstorlek.
- Mät stumpens längd (L) = 4 cm upp på stumpens distala ände till perineum.
- Mät stumpens omkrets i nivå med perineum (P).

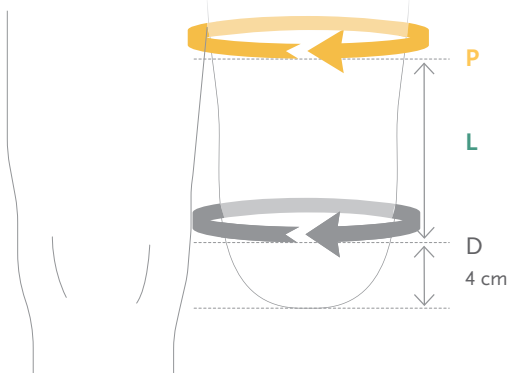

Välj en standard liner (=S) om det proximala omkretsmättet i nivå med perineum (P) är lika med eller under referensvärdet (<).

Välj en konisk liner (=K) om det proximala omkretsmättet i nivå med perineum (P) är lika med eller över referensvärdet (>).

Omkremsmätt 4 cm från distala änden (D)	Linerstorlek	Stumpens längd (L) 10 – 15 cm	Stumpens längd (L) 15 – 20 cm	Stumpens längd (L) 20 – 25 cm	Stumpens längd (L) 25 – 30 cm	Stumpens längd (L) 30 – 35 cm
		Proximalt omkretsmätt i nivå med perineum (P)				
24 – 26,5	25	– 30 >	– 34 >	– 36 >	– 39 >	– 42 >
26,5 – 28	26,5	< 31 >	< 35 >	< 38 >	< 41 >	< 44 >
28 – 30	28	< 33 >	< 37 >	< 40 >	< 43 >	< 46 >
30 – 32	30	< 35 >	< 39 >	< 42 >	< 46 >	< 49 >
32 – 34	32	< 36 >	< 41 >	< 45 >	< 48 >	< 52 >
34 – 36	34	< 38 >	< 43 >	< 47 >	< 51 >	< 54 >
36 – 38	36	< 40 >	< 45 >	< 49 >	< 53 >	< 57 >
38 – 40	38	< 42 >	< 47 >	< 51 >	< 56 >	< 60 >
40 – 45	40	< 44 >	< 49 >	< 54 >	< 58 >	< 62 >
45 – 50	45	S	S	S	S	S
50 – 55	50	S	S	S	S	S
Profil: S=Standard K=Konisk		S K	S K	S K	S K	S K