



KRAV

- Lineal
- Tape
- Markør

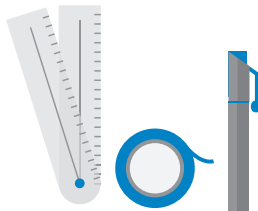

FIGUR 1

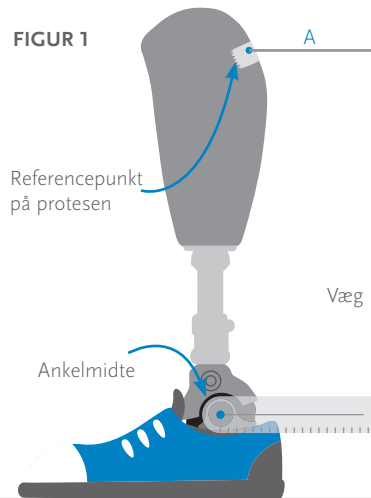


Referencepunkt på protesen

Væg

Ankelmidte

FIGUR 2

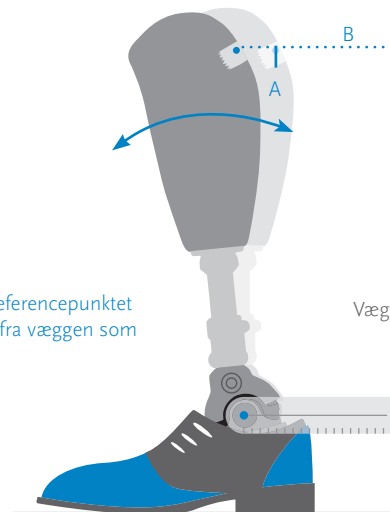

Justér protesen så referencepunktet er i samme afstand fra væggen som måling A.

Væg

P-550603DK-DK



VEJLEDNING

TRIN 1: Lav et referencepunkt bag på dit hylster med tape/markør.

TRIN 2: Tag linealen (medfølger) og anbring hængslet/hullet over ankels midte og den flade ende mod væggen som vist på Figur 1.

TRIN 3: Mål afstanden mellem referencepunktet på hylsteret og væggen, skriv det ned som måling A (se Fig. 1)

TRIN 4: Skift sko på protesen til den, du vil have på.

TRIN 5: Justér protesen ved hjælp af linealen i forhold til væggen som forklaret i **TRIN 2**.

TRIN 6: Mål den nye afstand mellem væggen og referencepunktet på hylsteret som vist med B på figur 2.

TRIN 7: Fodvinklen justeres ved at trykke på den indvendige knap for at frigøre anklen, hold foden fast og bevæg hylsteret bagud eller fremad for at genetablere måling A. Referencepunktet skal altid være i samme afstand som ved måling A.

Hvis **måling A er større** end måling B, **skubbes hylsteret fremad**.

Hvis **måling A er mindre** end måling B, **skubbes hylsteret ind mod væggen**.

TRIN 8: VIGTIGT: Tryk på den udvendige knap for at fastlåse anklen. Nu er det sikkert at bruge din protese.

BEMÆRK:

- Hvis du skifter sko igen, måler du en ny måling B.
- Hvis dit hylster eller protesejustering er blevet ændret af din bandagist, skal der foretages en ny måling A.
- Øv disse trin med din bandagist
- Disse vejledninger gælder for transtibialt, transfemoralt og knædisartikulationsamputerede.